

OPADIX®



Solución Ortoftalaldehído 0.55%

OPADIX® es una solución acuosa a base de Ortoftalaldehído al 0.55%, para la desinfección de alto nivel de dispositivos médicos sensibles al calor.

De alta eficiencia bactericida, fungicida, virucida y tuberculocida, incluida *M.chelonae*.

Preparación e indicaciones para su uso:

OPADIX® tiene una vigencia de 3 años.

• No requiere activación previa.

OPADIX® tiene un periodo de reuso máximo de 14 días.

La sangre u otros fluidos corporales y lubricantes deben limpiarse completamente de las superficies y lúmenes de los dispositivos, antes de reprocesarlos en el desinfectante. La sangre y otros fluidos corporales deberán desecharse de acuerdo con todas las regulaciones aplicables al desecho de residuos infecciosos. Una vez con el dispositivo limpio, sumerja completamente el instrumental al desinfectar dentro del líquido por un tiempo de 5 minutos. Realice pruebas de compatibilidad de materiales previo a su utilización. Efectúe un lavado posterior con agua estéril o de calidad microbiológica adecuada; en caso contrario, utilice alcohol etílico (la incorrecta manipulación posterior del material podría generar contaminación asociada a condiciones ambientales). Seque con una toalla estéril. El producto no debe ser utilizado en el reprocesamiento de instrumental urológico en pacientes con antecedentes de cáncer vesical. El producto se puede neutralizar para desechar, de la siguiente manera: 40 grs. de Neutralizador OPADIX® por cada galón de solución. Después de un tiempo de reacción de 1 h, la solución puede verterse a la red de desagüe de acuerdo con la normativa local. Utilizar equipo de protección personal (guantes, bata, protección ocular y mascarilla.). El área de trabajo debe ser un espacio bien ventilado, preferiblemente fuera de las áreas de servicio médico donde se realicen procedimientos, y donde los equipos eléctricos estén desconectados para evitar ac-



Química y mecanismo biológico de acción.

El ortoftalaldehído tiene compuestos que alteran la síntesis de ADN, ARN y proteínas, posee una intensa actividad bactericida, micobactericida, virucida y fungicida, lo que le da ventajas de rápida acción como desinfectante; no presenta un olor significativo, excelente compatibilidad con materiales, no coagula la sangre, ni fija los tejidos a las superficies. Mecanismo de acción.

Contenido:

- 1 galón con 3.785 litros de solución de ortoftalaldehído
- Frasco con 50 tiras verificadoras
- Frasco con reactivo neutralizador

Producto centroamericano hecho en Costa Rica por Laboratorios Químicos ARVI, S.A.

Tel. (506) 2279-9555 Ext. 106

comercial@arvicr.com - www.arvicr.com

No. Registro Sanitario EMB-CR-19-03054

Código Institucional CCSS No. 1-90-02-0021

Catálogo No. 402203